

BAUSCH + LOMB

BIO
true®

ONEday
(nesofilcon A)

Lentilles cornéennes souples (hydrophiles)

BAUSCH + LOMB

BIO
true®

ONEday

pour presbytie

(nesofilcon A)

Lentilles cornéennes souples (hydrophiles)

BAUSCH + LOMB

BIO
true®

ONEday

pour astigmatisme

(nesofilcon A)

Lentilles cornéennes souples (hydrophiles)

FEUILLET D'INFORMATION À L'INTENTION DU PATIENT

LENTILLES JETABLES À USAGE UNIQUE



MISE EN GARDE:

La loi fédérale stipule que ce produit doit être uniquement vendu ou prescrit par un praticien autorisé.

Entreposer les lentilles à une température supérieure à 34 °F (1 °C).
Imprimé aux États-Unis. En vigueur à compter de juillet 2017 (2017-07-31)

Nom et adresse du fabricant :
Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester, New York, 14609 USA

8101804CA

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	3
Restrictions et indications de port	4
Contre-indications (raisons pour ne pas utiliser les lentilles).....	4
Mises en garde.....	4
Précautions.....	5
Effets indésirables (problèmes et solutions).....	6
Hygiène personnelle et manipulation des lentilles	7
Préparation de la lentille pour le port	7
Manipulation des lentilles	7
Mise en place de la lentille sur l'œil	7
Centrage de la lentille	8
Retrait de la lentille.....	8
Entretien des lentilles qui adhèrent (immobiles).....	8
Urgences	8
Produits lubrifiants pour lentilles offerts par Bausch + Lomb.....	9
Directives à suivre pour les porteurs de lentilles monovision ou multifocales.....	9
Horaire de port personnel.....	10
Visites de suivi	11
Renseignements sur le professionnel de la vue	11
Glossaire de termes médicaux.....	12
Guide de référence des symboles	13

INTRODUCTION

Les instructions contenues dans ce feuillet s'appliquent aux lentilles cornéennes souples (hydrophiles) Biotrue^{MD} ONEday (nesofilcon A) de Bausch + Lomb, aux lentilles cornéennes souples (hydrophiles) Biotrue^{MD} ONEday pour presbytie (nesofilcon A) de Bausch + Lomb et aux lentilles cornéennes souples (hydrophiles) Biotrue^{MD} ONEday pour astigmatisme (nesofilcon A) de Bausch + Lomb. Si vous avez reçu ou si vous considérez une autre marque de lentilles, n'utilisez pas ce feuillet. Demandez à votre professionnel de la vue le feuillet ou les instructions pour les patients qui s'appliquent à votre marque ou à votre type de lentilles. Pour les lentilles cornéennes souples (hydrophiles) Biotrue^{MD} ONEday (nesofilcon A) de Bausch + Lomb, les lentilles cornéennes souples (hydrophiles) Biotrue^{MD} ONEday pour presbytie (nesofilcon A) de Bausch + Lomb et les lentilles cornéennes souples (hydrophiles) Biotrue^{MD} ONEday pour astigmatisme (nesofilcon A) de Bausch + Lomb, il est essentiel pour votre sécurité que vous lisiez et compreniez l'information et les instructions contenues dans ce feuillet, et que votre professionnel de la vue réponde à vos questions avant et après la réception de vos lentilles cornéennes.

Le port de lentilles est différent du port de lunettes. Puisqu'elles sont portées directement sur vos yeux, les lentilles affectent le fonctionnement de ces derniers. Ces effets ont tendance à augmenter avec la période où les lentilles demeurent sur vos yeux entre les retraits. Même si la grande majorité des gens portent des lentilles cornéennes sans problème, vous devriez discuter avec votre professionnel de la vue des effets qu'ont les lentilles cornéennes sur les yeux et des risques associés au port avant de décider de commencer ou de continuer à porter des lentilles tous les jours. Vous devriez également lire les sections de ce feuillet intitulées « Mises en garde », « Effets indésirables », « Précautions » et « Restrictions et indications de port ». Demandez à votre professionnel de la vue de vous expliquer tout ce que vous ne comprenez pas, y compris toute restriction supplémentaire qu'il ou elle pourrait vous fournir. Vos lentilles cornéennes souples (hydrophiles) Biotrue^{MD} ONEday (nesofilcon A) de Bausch + Lomb, vos lentilles cornéennes souples (hydrophiles) Biotrue^{MD} ONEday pour presbytie (nesofilcon A) de Bausch + Lomb ou vos lentilles cornéennes souples (hydrophiles) Biotrue^{MD} ONEday pour astigmatisme (nesofilcon A) de Bausch + Lomb ont été prescrites comme lentilles jetables à usage unique et elles doivent être jetées chaque fois que vous les retirez de vos yeux.

Vous devez aussi garder en tête que les lentilles souples, notamment celles dont il est question dans ce feuillet, sont faites d'un type de plastique qui absorbe les liquides, les vapeurs, et les petites particules; chez certaines personnes, elles peuvent également accumuler des dépôts provenant des fluides naturels des yeux. Vous devez donc suivre à la lettre les instructions contenues dans ce feuillet à la section « Hygiène personnelle et manipulation des lentilles », ainsi que les feuillets d'information imprimés accompagnant les produits d'entretien des lentilles que vous achetez et toutes les autres instructions qui vous sont données par votre professionnel de la vue. Le fait de ne pas suivre ces instructions et les restrictions de port des lentilles augmentera les risques de contamination, de dommages aux lentilles ou d'une accumulation de dépôts sur les lentilles, ce qui peut entraîner des infections ou des blessures graves susceptibles de mettre votre vue en danger.

Le respect de l'horaire de port prescrit et du calendrier des visites régulières chez votre professionnel de la vue est aussi nécessaire dans le cadre d'une utilisation adéquate et sécuritaire des lentilles cornéennes.

Il est important de ne pas porter vos lentilles plus longtemps que la durée recommandée par votre professionnel de la vue, car cela augmente le risque d'effets indésirables.

Des espaces sont réservés à l'arrière de ce feuillet pour que vous notiez votre horaire de port et les dates des prochaines visites de suivi. Les lentilles souples sont généralement confortables dès le début. Vous devez donc vous assurer de respecter l'horaire de port qui vous a été prescrit et de ne pas porter vos lentilles plus longtemps que prévu simplement parce que vous ne ressentez aucun inconfort et que vous n'avez aucun problème. Seul votre professionnel de la vue peut, au moyen d'un examen professionnel, déterminer comment vos yeux réagissent aux lentilles et s'il existe des signes précurseurs de problèmes éventuels.

Si des problèmes ou des symptômes se manifestent, retirez immédiatement vos lentilles et suivez les étapes décrites dans les sections du feuillet intitulées « Mises en garde » et « Effets indésirables ». (Consultez le « Glossaire des termes médicaux » pour une description des termes médicaux utilisés dans ce feuillet.) Il est essentiel de porter une attention immédiate aux problèmes, car ils peuvent exiger des soins professionnels immédiats.

Souvenez-vous que lorsque vous portez des lentilles souples, vos yeux devraient avoir une belle apparence sans vous causer de soucis, et votre vision devrait être claire.